

## Descosuc



ضد عفونی کننده سیستم های ساکشن دندانپزشکی

- ✓ قدرت پاک کنندگی عالی
- ✓ کف کنندگی کم
- ✓ مواد محافظت کننده بهینه جهت سیستم های ساکشن

Descosuc یک محلول ترکیبی برای ضدعفونی و پاک کردن تمام سیستم های ساکشن دندان می باشد. این محصول فاقد کلرین فعال است و به همین علت فلزات سنگین مانند جیوه موجود در آمالگام را دچار تغییر نمی کند. همچنین این محصول برای ضدعفونی ملایم و نگهداری سیستم های ساکشن دندان با یا بدون جداکننده های (سپراتورهای) آمالگام یکپارچه مناسب می باشد.

Descosuc بر پایه یک ترکیب کاملا جدید از آمونیوم چهارتایی حاوی ترکیبات فعال با سازگاری بالا با مواد می باشد. محصول دارای خواص پاک کنندگی عالی و کف کنندگی کم می باشد.

### محدوده کاربرد

این محصول جهت ضد عفونی، تمیز کردن و نگهداری از تمام انواع سیستم های ساکشن می باشد. استفاده منظم از Descosuc از تشکیل بایوفیلم و همچنین خوردگی دستگاه جلوگیری می کند.

### آماده سازی و مصرف

این محلول برای شستن و ضدعفونی ساکشن می تواند به صورت ۱٪ و یا ۲٪ استفاده گردد. برای تهیه یک لیتر محلول ۱٪ مقدار ۱۰ میلی لیتر و برای آماده سازی محلول ۲٪ مقدار ۲۰ میلی لیتر از دسکوسوس را در یک لیتر آب حل کنید و توسط ساکشن آنرا استخراج نمایید (برای محلول ۱٪ زمان ۳۰ دقیقه و برای

محلول ۲٪ زمان ۱۵ دقیقه). محلول آماده شده دارای خاصیت کف‌کنندگی کمی است و روزانه در پایان شیف‌ت کاری و یا قبل از شروع کار روزانه باید از این محلول جهت ضدعفونی دستگاه ساکشن انجام گیرد.

### خواص ضد میکروبی

- ✓ موثر بر باکتری‌ها از جمله MRSA
- ✓ توبرکلوساید
- ✓ قارچ‌کش (کاندیدا آلبیکنز) و مخمرکش
- ✓ غیرفعال‌کننده ویروس‌های HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia viruses

### غلظتها و زمان‌های مواجهه

۱ درصد ۳۰ دقیقه	باکتری‌کش شامل MRSA، قارچ‌کش (کاندیدا آلبیکنز)
۲ درصد ۱۵ دقیقه	و مخمرکش طبق VAH/DGHM در شرایط محیط کثیف
۱ درصد ۳۰ دقیقه	باکتری‌کش توبرکلوزیس (مایکوباکتریوم تررا)
۲ درصد ۱۵ دقیقه	
۱ درصد ۲۰ دقیقه	موثر علیه همه ویروس‌های غلاف‌دار شامل HBV /
۲ درصد ۱۰ دقیقه	Vaccinia / BVDV/ HIV / HCV / ویروس‌های آنفلوانزا طبق DVV/RKI

### ترکیبات

۱۰۰ گرم محلول شامل: ۶ گرم کلرید دی‌آلکیل دی‌متیل آمونیوم

همه سورفاکتانت‌های موجود مطابق دستورالعمل مواد شوینده اتحادیه اروپا زیست‌تخریب پذیر هستند.

## خواص فیزیکی و شیمیایی

شکل ظاهری: مایل به سبز، مایع روشن

pH:  $10.5 \pm 0.5$

وزن مخصوص ( ۲۰ درجه سانتی گراد):  $0.996 \pm 0.002$  گرم در میلی لیتر

## اطلاعات ویژه

در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان چشم ها شستشو گردد و مشاوره پزشکی صورت گیرد. این محلول و ظرف نگهدارنده آن باید به طریق ایمن دفع شوند.

Descosuc حاوی تمام ترکیبات لازم برای حفاظت سیستم ساکشن دندان می باشد. بنابراین Descosuc را با افزودنی ها و سایر محصولات مخلوط نکنید.

## اطلاعات زیست محیطی

محصولات دکتر شوماخر (GmbH) با توجه به فرآیندهای مدرن، ایمن و سازگار با محیط زیست تولید شده است. با توجه به داشتن استانداردهای کیفیت بالا، محصولات با کیفیت ثابت و بسیار خوبی را تضمین می کند. این شرکت مورد تایید استاندارد DIN EN 14001، DIN EN 9001، DIN EN ISO 13485 و BS OHSAS 18001 و دارای تاییدیه سیستم مدیریت محیط زیست (EMAS) می باشد.

