

PERFEKTAN ENDO

ضد عفونی کننده ابزارهای پزشکی و جراحی، شوینده و ضد عفونی کننده آندوسکوپ



- ✓ موثر بر بیشتر ویروس ها
- ✓ فاقد آلدئید و فنول
- ✓ پاک کنندگی عالی
- ✓ سازگاری بالا با سایر مواد و مناسب برای آندوسکوپ ها

ویژگی فرآورده:

پرفکتان اندو محلول ضد عفونی کننده قوی فاقد آلدئید ابزار و لوازم پزشکی است و دارای قابلیت پاک کنندگی بالایی می باشد. این محصول دارای خواص سینترژیک بوده و فرمولاسیون محلول با بسیاری از مواد سازگاری داشته و با استانداردهای ضد عفونی کننده های ابزار تست گردیده است. این محصول دارای ضد خوردگی های بسیار موثر می باشد و دارای فنول و آلدئید نمی باشد. به دلیل پاک کنندگی بالای این محصول و مطابقت با استانداردهای رابرت کخ برای ضد عفونی و شستشوی ابزار و آندوسکوپ کاربرد دارد. با توجه به فرمولاسیون محصول که فاقد آلدئید است، پروتئین ها را روی ابزار فیکش نمی کند. برای ایمنی بیشتر اشخاص، می توان ضد عفونی را بدون شستشوی اولیه ضد عفونی نمود. (توصیه می شود در این مورد حتما محلول بعد از استفاده امحاء شود)

کاربرد:

پرفکتان اندو برای ضد عفونی و شستشوی انواع ابزار جراحی از جمله ابزارهایی که برای جراحی های میکروتهاجمی (MIS)، بیهوشی و آندوسکوپیهای منعطف و غیر منعطف کاربرد دارد. این محصول در حمام های اولتراسونیک نیز قابل استفاده می باشد. این محصول به عنوان یک ضد عفونی کننده سریع ابزار کاربرد دارد.

روش کار:

ابزارها را بعد از استفاده در محلول غوطه ور کنید به طوری که همه حفره ها را در بر بگیرد. بعد از زمان اثر، ابزارها را آبکشی نمایید. آبکشی نهایی بهتر است با آب مقطر انجام شود و سپس ابزارها خشک گردند. در صورتی که آلودگی در محلول مشاهده شد، محلول را تعویض کنید. ماندگاری محصول طبق نظر کارشناسان قابل ارائه می باشد.

ویژگی های ضد میکروبی فرآورده :

موثر بر باکتری ها شامل MRSA (استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین) توبرکلوسیدال

قارچ کش (کاندیدا آلبیکانز) / مخمر کش

غیرفعال کننده ویروس ها : HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia/Polyoma/Adeno virus, Polio virus (at 50°C)

bactericidal incl. MRSA and fungicidal (C. albicans) / levurocidal acc. to DGHM/VAH-guidelines	1%-60 min
	2%-30 min
	3%- 15min
TB bacteria (M. terrae)	1% - 60 min
	2% - 30 min
	3%- 15 min
disinfection in combination with ultrasound	1% - 5 min
Sporcidal (suspension test)	3% - 2 hrs
effective against all enveloped viruses acc. to RKI recommendations incl. HBV/HIV/HCV/BVDV/Ve	1% - 30 min
	3% - 15 min
Adeno virus	2% - 60 min
	4% - 30 min
Papova/Polyoma virus	1% - 60 min
	2% - 30min
Polio virus (50 °C)	1% - 10 min

مواد مؤثر:

هر ۱۰۰ گرم پرفکتان اندو شامل:

۳/۷۵ گرم کوکوس پروپیلن دی آمین گوانیدیوم دی استات
۵/۶۳ دی دسیل اگزتیل متیل آمونیوم پروپیونات می باشد.
مواد تشکیل دهنده این محصول زیست تجزیه پذیر می باشند.

محلول سازی و نحوه استفاده :

۱. پیش از مصرف پرفکتان اندو، تمامی وسایل را با آب و در صورت نیاز مواد شوینده به دقت بشویید.
۲. برای ساخت محلول ضد عفونی کننده، هر ۳۰ میلی لیتر پرفکتان اندو را با ۹۷۰ میلی لیتر آب مخلوط کنید (۳٪).
۳. وسایل و ابزار آلوده را در ظرف حاوی ضد عفونی کننده غوطه ور نمایید بطوری که تمامی سطوح و حفره های آنها داخل محلول قرار گیرد.
۴. سپس درب ظرف را به مدت ۱۵ دقیقه بسته نگه دارید.
۵. بعد از مدت زمان ۱۵ دقیقه، وسایل و ابزار را از محلول خارج و زیر شیر آب با دقت بشویید.
۶. پس از شستشو، وسایل را با دقت با یک دستمال تمیز خشک کنید.

تاییدیه ها و گواهینامه ها:

- DGHM/ VAH List
- گواهینامه EC 93/42
- تاییدیه شرکت های سازنده تجهیزات آندوسکوپی، نظیر IBE & Olympus-Winter,Storz و Wolf