



Instrument cleaning



PLURAZYME® extra

enzymatic cleaner for surgical instruments and endoscope reprocessing

پلارازیم اکسترا، پاک کننده سه آنزیمی برای شستشو ابزارهای جراحی و آندوسکوپی‌ها

- ✓ قدرت پاک کنندگی بالا
- ✓ مقرون به صرفه
- ✓ ایده آل برای حمام‌های التراسونیک
- ✓ سازگاری با مواد فوق العاده

پلارازیم اکسترا به دلیل ترکیب داشتن سورفکتانت های سطحی فعال غیر یونی و کمپلکس آنزیم های سه گانه پایدار شده ، دارای عملکرد پاک کنندگی عالی می باشد. فرمولاسیون این ماده به گونه ای است که با مواجهه و نفوذ موثر همه انواع آلودگی های آلی مانند پروتئین، خون لخته شده، موکوس، استفراغ، چربی و مواد مدفوعی را حتی در نقاط غیرقابل دسترس به نحوی عالی پاک می کند.

طیف مصرف:

پلارازیم اکسترا بطور خاصی مناسب شستشوی دستی می باشد و فاقد خاصیت تثبیت کردن پروتئین است. برای موارد زیر کاربرد دارد:

- انواع ابزارهای پزشکی
- آندوسکوپیهای منعطف و غیر منعطف
- لوازم جانبی مربوط به آندوسکوپ ها
- ایده ال برای استفاده در حمام های التراسونیک

طریقه مصرف:

محلول شستشو ۰/۴ درصد پلارازیم اکسترا را با مخلوط ۴ میلی لیتر از محلول کنسانتره در یک لیتر آب گرم (دمای ۳۰ الی ۴۰ درجه) تهیه کنید. ابزارها و آندوسکوپها را در محلول شوینده غوطه ور نموده و مطمئن شوید که همه سطوح ابزارها و حفرهها خیس می شوند. هوای موجود در داخل لولهها را خارج کنید. در صورت نیاز ابزار را برس بزنید. کانالهای آندوسکوپ را بطور مکانیکی تمیز کنید. ابزارهای پاک شده را قبل از انجام مراحل بعدی کار (ضدعفونی) با آب تمیز آبکشی نمایید.

ترکیبات:

۵ - ۱۵٪ سورفکتانت غیر یونی؛ مواد نگهدارنده: متیل ایزوتیازولینون، بنزیستیاژلین؛ آنزیمهای: پروتئاز، آمیلاز، لپاز

خواص شیمیایی:

ظاهر: محلول آبی شفاف

pH کنسانتره: ۸

pH محلول ۰/۴ درصد: ۷ الی ۷/۵

مقدار مصرف		
غلظت	دما	زمان غوطه‌وری
۰/۲۵ درصد (۲/۵ میلی لیتر در لیتر)، مناسب برای حمام‌های التراسونیک	۳۰-۴۰ درجه سانتی‌گراد	حداقل ۵ دقیقه
۰/۴ درصد (۴ میلی لیتر در لیتر)	۳۰-۴۰ درجه سانتی‌گراد	حداقل ۵ دقیقه

اطلاعات بیشتر

در صورت پاشیدن به چشم، باعث آسیب‌های شدید چشمی می‌شود. دستکش، روپوش، محافظ چشم و محافظ صورت پوشیده شود. در صورت تماس با چشم، چشم‌ها را با دقت برای چند دقیقه بشویید. اگر لنزهای چشمی وجود دارد در صورت امکان بردارید. عمل آبکشی چشم را ادامه دهید. با پزشک یا متخصص مربوطه تماس بگیرید. این محصول حاوی آمیلاز، آلفاسابتیلیسین، لپاز می باشد و ممکن است باعث بروز آلرژی شود.

سازگاری با مواد

پلارازیم اکسترا سازگاری بالای با مواد دارد و برای مواد زیر تست شده است:

فلزات: استیل ضدزنگ (V2A, V4A)، مس، آلومینیوم

پلاستیک‌ها: پلی متیل متاکریلات، پلی اکسی متیلن، آکریلونیتریل-بوتادین-استیرن، پلی کربنات، پلی یورتان، پلی اتیلن، پلی آمید، پلی استیرن، پلی استر

الاستومرها: نیتریل بوتادین رابر، نئوپرن (پلی کلروپرن)، سیلیکون، لاتکس

توصیه می‌شود روی این سطوح استفاده نشود: فلز برنج، اتیلن پروپیلن دین مونومر رابر

وضعیت محصول

پلارازیم اکسترا مطابق با رهنمود اتحادیه اروپا برای تجهیزات پزشکی (93/42/EC) می باشد. این محصول فقط برای استفاده تخصصی است.